

NEW

PETATTO Mask produced by JM EC

ペタットマスク [飛沫感染防止 患者用マスク] 安心の日本製

数量：1箱 50枚入 サイズ：2種類 Large(約100×55mm) Small size(約80×55mm)



肌に密着し、鼻と口をしっかりカバー マスクをしたまま治療できる患者用マスク

- ◆ S・Lの2サイズ展開で、幅広い患者様に対応が可能です。
- ◆ レーザー等でも燃えにくい難燃性の不織布*です。
- ◆ テープ(肌用)で皮膚に固定。座位や横向きでもずれません。

*燃えにくい素材を使用していますが、燃えないわけではありません。

青木先生と共同開発

患者様、そして医療従事者の安心のために



青木 律 先生

公益社団法人
日本美容医療協会 理事長

新型コロナウイルスによるパンデミックはワクチン接種という夜明けが少し見えてきたようですが、しかしなおアフターコロナの世界は見通せず、当面ウィズコロナとして対応しなくてはならないようです。

美容医療の施術中は患者様と医療従事者との距離が近くなることも多く、常に院内感染のリスクを孕んでいます。

美容医療協会ではこの度ウィズコロナを見通したガイドラインを作成しましたが、その中でも患者様の鼻と口をマスクで覆うことの重要性を謳っております。

そこで協会として医療現場での安全を最優先に配慮したマスクの作成を提案し、この度JM EC様のご協力のもと「少しの面積で鼻と口を覆うマスク」が完成しました。

レーザー使用時も想定し難燃性の素材を使うなどでコストも掛かってしまいましたが、社会貢献として協力しますというJM EC様のご理解もあり実臨床での使用に無理のない価格設定をしていただくことができました。

この製品が少しでも多くの方の安心に繋がれば幸いです。

装着は誰でも簡単
テープで
ペタッと貼付するだけ


〈使用方法〉



① ペタットマスクの上下の向きを確認します。



② マスクを広げ、内側のテープをはがします。

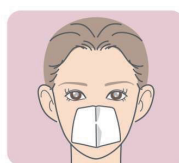

③ 鼻と口が覆われる位置にマスクを貼り付けます。



装着イメージ
(写真はSサイズを着用)

モニター患者さまのお声

治療するときはマスクができないのでは…と不安でしたが、安心して治療を受けられました。
ぴったりフィットするけど、苦しくない！
感染対策に気を配っているクリニックだなあと思いました。これからも通いたいです。

テープで貼っているので、レーザー治療の時、横を向いてもずれ落ちませんでした。
ちゃんと覆われているので、先生の顔が近くにあっても安心でした。

WEBショップからご注文いただけます

ジェイメック WEBショップ



plus
RESTORE

プラスリストア
患者様向け公式サイト

<https://cosme.jmec.co.jp/>



プラスリストア
公式アカウント
@plusrestore