

機械器具(74)医薬品注入器
一般医療機器：注射筒・針用アダプタ JMDNコード：35384000

メソラム・インジェクションプレート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) C3;円形3本

上面




側面



(2) C5;円形5本

上面

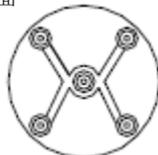


側面




(3) C7;円形7本

上面

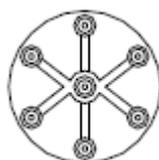

側面

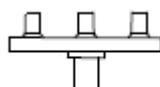

(4) L3;長方形3本

上面




側面



(5) L5;長方形5本

上面

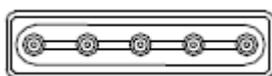

側面



2. 材質

AS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。

【使用方法等】

- 滅菌パウチが密封されていることを確認する。
- 滅菌パウチから本品を取り出し、本品に破損がないことを確認する。
- 注射針(届出対象外)を本品にしっかり取り付ける。
- チューブ、シリンジ等を本品にしっかり接続する。
- 注射針(届出対象外)のプロテクタを外し、施術を開始する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用前に使用期限を確認し、期限が過ぎている場合は、使用しないこと。
- 本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。包装が破損、汚染している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は、使用しないこと。
- 本品が汚染されないように開封し、開封後は直ちに使用すること。
- 使用後は、地域条例に従って廃棄すること。
- 本品は、トレーニングを受けた医師のみが使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジェイメック

住 所：東京都文京区湯島 3-31-3 湯島東宝ビル

電 話 番 号：03(5688)1803

製 造 業 者：リモス社

RIMOS.

国 名：イタリア