

レビュー2

re-Beau2

肌画像撮影器



30th
ANNIVERSARY

JMEC
FOR THE PATIENTS' SMILE

肌画像カウンセリングシステム

フェイシャル治療を さまざまなシーンでサポートします

レビュー2は、皮膚の可視化はもちろん、
患者満足度の高いカウンセリングに役立ちます。

治療に対しての説得力・信頼感を高め、
治療意欲の向上、治療の継続につなげます。
また、万一のクレームにも活用できます。

レビュー2でできること

- カラー写真 ●UV写真 ●赤み写真*
- 解析機能(しみ・しわ・毛穴・明度・赤み)*
- 電子カルテ連携*

※オプション

★★★ 現場のニーズを形に

先生方や医療現場の声をもとに、ジェイメックが開発・
設計し、日本で製造しています。先生方の診療のお役に
立てるよう、より高品質な製品づくりを心がけています。



症例写真としての「レビュー2」のこだわり

レビュー2は、高いクオリティの症例写真を誰でも簡単に撮影・比較することができます。



高い再現性

写真を比較する上で、毎回同じ条件で撮影することは重要です。面倒なライティング・カメラの設定、顔の位置や角度など、いつでも誰でも同じ条件で撮影できます。




高画質で鮮明な写真

カラー・UV・赤みのどの写真でも、くっきりとした鮮明な写真を撮ることができます。写真を拡大しても画質が落ちることなく、細部まで比較できます。



クリアな赤み写真

メラニンの影響をできるだけ小さくし、表面には見えない赤みまでクリアに撮影するため、擦り過ぎによる赤みや、しみの下に隠れた赤みを確認できます。

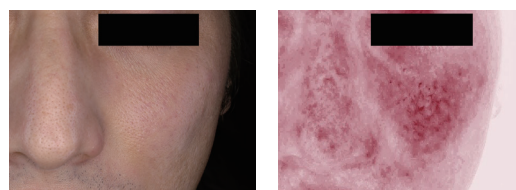

並べた写真を簡単比較

独自の「シンクロズーム®」機能により、最大3枚の写真を指で同時に拡大・縮小・移動ができ、細部まで確認することができます。





患者満足度の高い 説得力のある カウンセリングへ


肌状態を見える化

写真を撮ることで、肌状態を客観的に見ることができます。カラー写真は自然光で見たときに近い色で、UV写真は目視ではわかりにくい隠れたしみ・色素脱失・ポルフィリンなどを、赤み写真はしみの下に隠れた赤みなどを見える化します。



治療経過を一緒に確認

治療経過を時系列に並べ、一緒に確認することで、治療に対する期待値や満足度の把握に役立ちます。

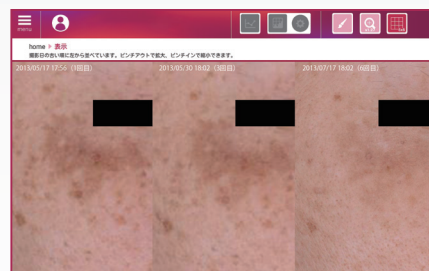

小さな変化もキャッチ

高画質で再現性の高い写真を独自の「シンクロズーム®」機能で細部まで比較できるため、小さな変化を見つけることができ、患者様のモチベーションアップにつながります。



変化に気づきにくいホームケア化粧品の使用前後

信頼関係を深める

美容治療では患者様の理解と協力が不可欠なため、写真を活用した説得力のあるカウンセリングを通じて、信頼関係を深め、治療の継続につなげます。

運用に便利な タブレット

スマホ感覚で直感的に操作でき、持ち運びや増設ができて便利です。



時間や手間をかけずに撮影

カラー、UV、赤みの写真を一度に撮影できます。説明書を読まなくても誰でも直感的に操作でき、スタッフの手を煩わせません。



院内どこでもカウンセリング

小さくて持ち運べるタブレットで、院内どこでもカウンセリングができます。



タブレット増設で運用効率アップ

タブレットを増設*すると、撮影中でも診察室や治療室などで同時に他の患者様のカウンセリングができるため、多くの患者様に対応できます。

※2台目以降はオプション(最大4台)

■ 導入例



※無線LAN中継器が別途必要な場合もあります。

使いやすさを追求

1万人分※のデータを一元管理

面倒な写真の整理は必要なく、膨大な写真データの中から
見たい写真を簡単に呼び出せます。

※カラー・UV・赤み写真をそれぞれ3方向、5回撮影した場合




患者番号	氏名	フリガナ	生年月日	年齢	回数
010434	埼玉 美咲	サイタマミホ	—	—	0
011456	千葉 あきこ	チバアキコ	1982/01/02	35	1
028696	徳島 安子	トクシマヤスコ	—	—	0
017323	栃木 梓織	トチギレモン	—	—	2
010644	富山 尚子	トヤマシュンコ	1987/11/28	29	3
012775	長野 正子	ナガノマサコ	1972/09/01	44	3
027833	宮崎 真奈美	ミヤザキマナミ	—	—	0
027783	札幌 花子	レビュハナコ	1991/07/01	26	3

取り込み、書き出しが簡単

別のカメラで撮影した写真をレビュー2に取り込んだり、
SNSや資料用に写真を書き出ししたりすることができます。

撮影の再現性を高めるゴースト機能

2回目以降の撮影の際に、前回撮影した写真を表示させ、
顔の位置や角度を合わせながら、再現性の高い撮影が
できます。

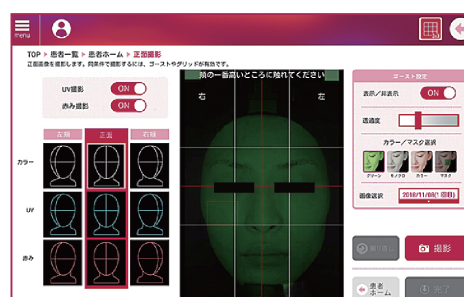

数値で可視化する解析機能※

撮影した写真を基にした数値・グラフで経過の変化を確認
できます。

※しみ・しわ・毛穴・明度・赤み／オプション



電子カルテと連携※

レビュー2で撮影された写真を自動的に取り込み、電子
カルテ内に情報や写真を集約することができます。

※ウィーメックス株式会社 電子カルテシステム「Medicom」／オプション

さまざまなシーンでレビュー2を活用

| 治療の計画をサポート

目視では確認できない肌の状態を把握することで、治療計画を立てる上での補助材料として、サポートします。

| PRや学術論文・講演発表に活用

撮影した写真を院内のPRなどに活用できます。また、学術論文や講演発表での症例写真にも適しています。


| 万一のクレーム対応にも

治療経過を写真で残しておくことで、元々あったしみや色素脱失などを確認することができます。

レビュー2で確認できること

しみ

〈 カラー写真 〉

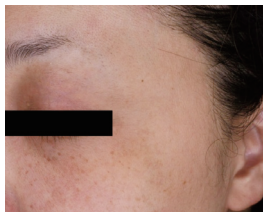

〈 UV写真 〉




色素脱失

〈 カラー写真 〉



〈 UV写真 〉

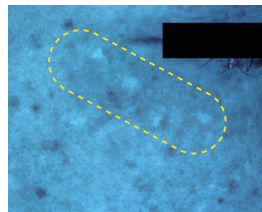


目視ではわかりにくい隠れたしみや色素脱失をUV写真で確認できます。

ポルフィリン

〈 カラー写真 〉



〈 UV写真 〉

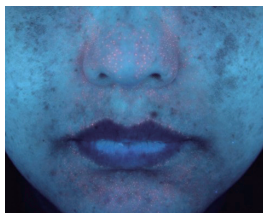


アクネ菌の代謝物であるポルフィリンが
UV写真ではピンク色に光ります。

しみの下の赤み

〈 カラー写真 〉



〈 赤み写真 〉

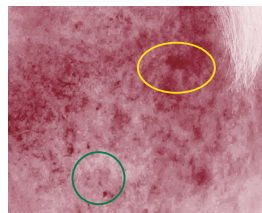

しみの下の赤みを確認できます。

○ 赤みの少ないしみ ○ 赤みがみられるしみ

re-Beau2

仕様

*本仕様値は、公称値です。

外形寸法	撮影装置	350 (W) × 495 (D) × 405 (H) mm
	タブレット端末	235 (W) × 154 (D) × 7 (H) mm
	PC本体	260 (W) × 220 (D) × 55 (H) mm
	無線LANアクセスポイント	160 (W) × 160 (D) × 45.5 (H) mm
	レビュー台	350 (W) × 430 (D) × 220 (H) mm
重量	撮影装置	約14.7kg
	タブレット端末	約0.43kg
	PC本体	約1.5kg
	無線LANアクセスポイント	約0.27kg
	レビュー台	約7.8kg
定格電源	撮影装置	100V、60VA、50/60Hz
	タブレット端末	100V、25VA、50/60Hz
	PC本体	100V、400VA、50/60Hz
	無線LANアクセスポイント	100V、100VA、50/60Hz

※商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※re-Beau SKIN IMAGING SYSTEM は、株式会社ジェイメックの登録商標です。

標準セット内容

撮影装置	1台
タブレット端末	1台
PC本体	1台
無線LANアクセスポイント	1台
各種コード	1式
暗幕	1枚
ケーブル、ヘアバンド	1式

オプション

赤み撮影機能
解析ソフト
タブレット端末(2台目以降)
レビュー台(高さ調節用)
電動昇降テーブル
大型モニター
プリンタ



レビュー台

| JMEC公式サイト(製品ページ)

JMEC
WEB SHOWROOM



JMEC 株式会社ジェイメック

東京本社	〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル
	TEL. 03-5688-1803 FAX. 03-5688-1805
札幌支店	TEL. 011-748-4311 FAX. 011-748-4312
名古屋支店	TEL. 052-238-1045 FAX. 052-238-1046
大阪支店	TEL. 06-6388-1866 FAX. 06-6388-1151
九州支店	TEL. 0957-35-8300 FAX. 0957-35-8301

<https://www.jmec.co.jp>